




# Kangaroo™

## Bomba de alimentación enteral KANGAROO OMNI™

Guía de referencia rápida

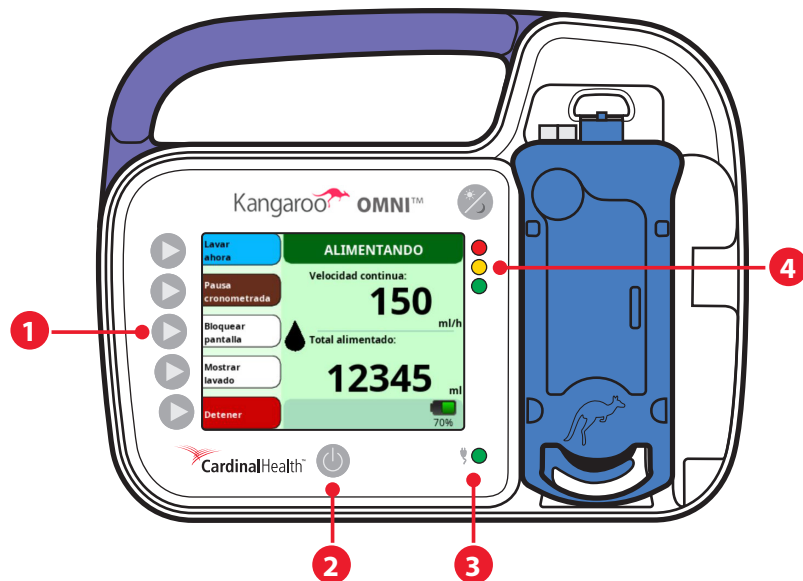

es –

### 1. Botones de selección

Pulse una tecla para seleccionar la opción que aparece junto a esto en la pantalla.

### 2. Botón de encendido

Púlselo una vez para encender el dispositivo. Manténgalo pulsado para apagarlo.

### 3. Fuente de alimentación


Se enciende una luz verde cuando la bomba está conectada a la alimentación de CA.

### 4. Estado de la bomba


- = Alarma de advertencia
- = Aviso o alarma de precaución
- = Reposo o alimentación

Consulte el reverso para obtener más información. ➔


## Configurar la bomba

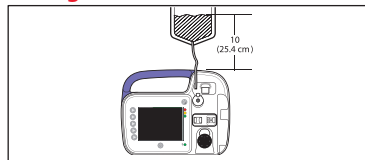


1. Asegúrese de que la parte superior de la columna de fluido esté ubicada 10 pulgadas (25,4 cm) por encima de la parte superior de la bomba.

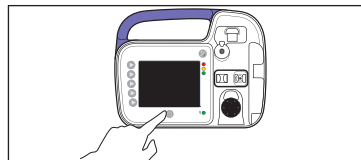

2. Pulse el botón **Power (Encendido)**.

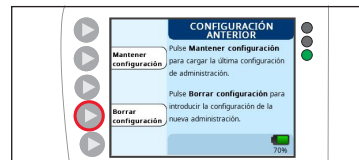

3. Seleccione **Clear Settings (Borrar ajustes)** para introducir nuevos parámetros de alimentación. Seleccione **Keep Settings (Mantener ajustes)** para mantener los parámetros de alimentación anteriores.

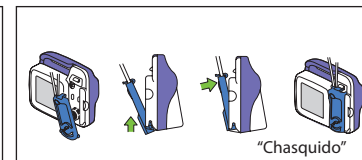


4. Cargue el sistema. Inserte desde abajo y encaje en su lugar.


## Purgar la bomba




1. Seleccione **Prime (Purgar)**.

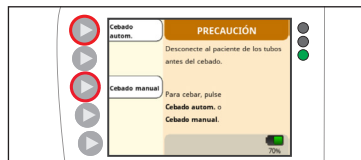

2. Seleccione Priming Mode (Modo de purga).

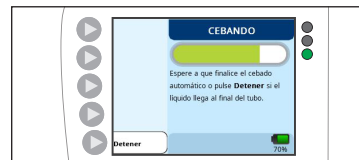


Si seleccionó Auto Prime (Purga automática):  
3. Espere a que la bomba finalice la purga.

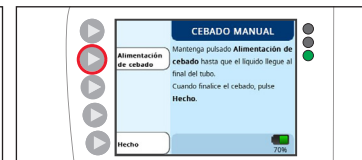


Si seleccionó Manual Prime (Purga manual):  
4. Mantenga pulsada la opción **Prime Feed (Alimentación de purga)** hasta que el líquido alcance el extremo del tubo.

## Iniciar una nueva alimentación

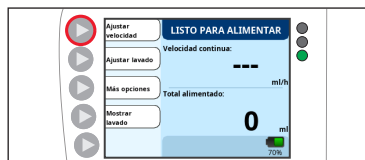

Si seleccionó Clear Settings (Borrar ajustes):  
1. Seleccione **Adjust Rate (Ajustar velocidad)**.

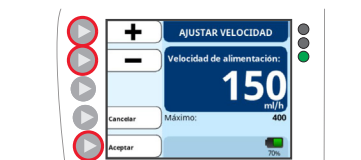

2. Pulse los botones + y - para introducir la velocidad y, a continuación, seleccione **OK (Aceptar)**.




3. Cuando esté listo para iniciar la alimentación, seleccione **Start (Inicio)**.

## Pausar la alimentación




1. Para suspender la alimentación, seleccione **Timed Pause (Pausa programada)**.

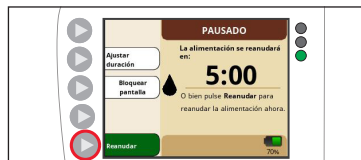

2. Para reanudar la alimentación, seleccione **Resume (Reanudar)**. La bomba se reanudará por sí sola después de que transcurra el tiempo.

## Apagar la bomba

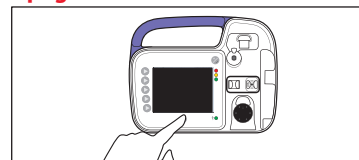

1. Pulse el botón **Power (Encendido)**.

Para obtener más información o conocer más sobre su funcionamiento, consulte las instrucciones de uso de la bomba de alimentación enteral Kangaroo OMNI™.



mycardinalmsds.com



Siga las instrucciones de uso. El símbolo aparece azul en el aparato.  
RM inseguro Evite las temperaturas extremas

RM inseguro – elemento conocido por suponer un riesgo en todos los entornos de RM.  
Visite el Centro de aprendizaje Kangaroo™ en [www.mykangaroolearning.com](http://www.mykangaroolearning.com) para obtener más información.

**Cardinal Health 200, LLC**

3651 Birchwood Drive  
Waukegan, IL 60085 USA  
Rev. A 2023-03 • cardinalhealth.com • HP15204

© 2023 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. CARDINAL HEALTH, el LOGOTIPO de Cardinal Health, KANGAROO, el LOGOTIPO de Kangaroo y KANGAROO OMNI son marcas registradas de Cardinal Health y pueden estar registradas en EE. UU. o en otros países. Para las patentes, ingrese en [cardinalhealth.com/patents](http://cardinalhealth.com/patents).